



medi

# medi Wrist support

Handgelenkorthese

Wrist support

Orthèse de poignet main

Órtesis de muñeca

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi.  
Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per  
l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning.  
Návod k použití. Uputa za uporabu. Інструкція по  
использованию. Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania.  
Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató. Uputstvo za  
upotrebu. Інструкція з використання.

medi. I feel better.



1



2



3



4

# medi Wrist support

---

## Назначение

Бандаж на лучезапястный сустав medi Wrist support может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа в качестве раневого покрытия.

---

## Показания

- хроническое или посттравматическое повреждение мягких тканей запястья
- паралич лучевого нерва
- травмы и повреждения лучезапястного сустава
- тендиниты и теносиновиты
- ревматоидный артрит

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Принцип действия

Иммобилизация и стабилизация запястья при помощи моделируемой алюминиевой шины.

## Рекомендации по надеванию

- Вставьте предварительно смоделированную алюминиевую шину в карман.
- Расстегните ремни и вставьте руку в ортез. Алюминиевая шина должна располагаться с ладонной стороны конечности.
- Застегните ремень, ближайший к пальцам.
- Застегните ремень, ближайший к локтевому сгибу.
- Застегните средний ремень.

---

### Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



---

### Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### Материалы

лайкра, Алюминий

### Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

### Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!